

CLINIK DES AL

Medicinski pripomoček  1304

Nevtravno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola.

PODROČJE DELOVANJA

Clinik Des Al je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, miz za prevoz in pregled, ...) ter ostalih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih površin, zidov v medicinskih ustanovah in čakalnicah za bolnike, sanitarnih površin, ...) ter posod, kjer je povečano tveganje okužb.

Izgled: prozorna tekočina
Gostota (20°C): ca. 0,9 g/cm³

NAČIN UPORABE

Clinik Des Al se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m². Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.

Razkužilo: 100g Clinik Des Al vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Des Al ni primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah.

ROK UPORABE

3 leta od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjena na embalaži.

PAKIRANJE

ŠIFRA

1L z razpršilko	6653
1L z zaporko	10594
5L ročka	6654

UČINKOVITOST	Čas delovanja
Baktericidno delovanje	
EN 1040, EN 13727 (vključno MRSA)	30 s
EN 17387, EN 13697, EN 14561	5 min
Mikobaktericidno delovanje	
EN 14348	30 s
Virucidno delovanje	
EN 14476: Virus vakcinije, Norovirus	15 s
EN 14476: Adenovirus*	1 min
EN 14476: Poliovirus	2 min
EN 16777: Virus vakcinije	2 min
EN 16777: Norovirus, Adenovirus	5 min
EN 14476: Virucid - virusi z ovojnico	15 s
EN 16777: Virucid - virusi z ovojnico	2 min
EN 14476: Virucid	2 min
EN 16777: Virucid	5 min
Levurocidno delovanje (kvasovke)	
EN 1275, EN 1650, EN 13624	30 s
EN 17387, EN 13697	1 min
EN 14562	5 min
Fungicidno delovanje (plesni)	
EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	5 min

* umazani pogoji

KOMPATIBILNOST MATERIALOV S CLINIK DES AL

- 1 = Odlična.** Ni učinkov.
- 2 = Dobra.** Pri daljših izpostavitvah vidni manjši učinki. Kvalitete in uporabnosti materiala ne zmanjša, lahko povzroči rahlo razbarvanje.
- 3 = Vprašljiva.** Pri daljših izpostavitvah vidni učinki. Lahko povzroči mehčanje, zmanjšano trdnost in napihovanje materiala. Izgled lahko postane estetsko vprašljiv. Preveriti pri proizvajalcu naprave/površine. Po nanosu je priporočljivo površino obrisati.
- 4 = Nezadostna.** Uporaba z materiali odsvetovana. Lahko povzroči hujše estetske in funkcionalne poškodbe površin.

Material	Ocena kompatibilnosti
ABS plastika	2
Aluminij	1
EPDM	1
Keramika	1
Lateks	1
LDPE	1
Neopren	2
Nerjaveče jeklo 304	2
Nerjaveče jeklo 316	1
Nitril	1
PEEK	1
PVC	3
Silikon	1
Teflon – PTFE	1
Titanovo jeklo	1

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

Proizvajalec:

KIMI d.o.o.

Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija

T: +386 1 5300 550, info@kimi.si, www.kimi.si

Izdaja:

Junij 2022

Številka izdaje: 10

Stran: 2/2